

Evaluación de pruebas con sueros de pacientes

Estudio de sensibilidad

Test Biognost® IFI

Parámetro:	ANA
-------------------	------------

Descripción del parámetro: anti-nucleares anticuerpos en HEp-2 células

Valor de referencia inferior:	0
--------------------------------------	----------

N.º de sueros examinados:	35
----------------------------------	-----------

Desviación estándar:	4776
-----------------------------	-------------

Título medio*:	3979
-----------------------	-------------

Título superior:	16384
-------------------------	--------------

N.º de sueros < intervalo de referencia:	0
--	----------

Sensibilidad:	100%
----------------------	-------------

Fecha última revisión:	11/09/2023
-------------------------------	-------------------

Los datos presentados provienen de pruebas realizadas entre 1989 y la fecha de la última revisión. Parte de los sueros utilizados en ellas ya se han agotado y no están disponibles.

Nuestros sueros de pacientes provienen de:

- Reconocidos institutos de donación de sangre estadounidenses de quienes recibimos los sueros para los controles positivos.
- Institutos alemanes y extranjeros que nos envían sueros para comprobar sus resultados.
- Laboratorios de referencia alemanes y extranjeros (OMS, NIBSC, PIS, RKI, etc.) de quienes recibimos sueros estándar para la evaluación de pruebas y sueros caracterizados.

Todos los datos se han obtenido con sueros individuales.

*Título umbral, título indicativo de contaminación endémica